




İstanbul Merkez Ofis
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/1 Kat:1 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 545 8080

www.respitek.com.tr



PAP Dezenfeksiyon Cihazı OD-100

Kullanım Kılavuzu

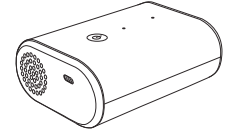

Ürün Modeli


OD-100

Uygulama Alanı

Micomme OD-100 ozon üretir ve ventilasyon cihazlarını dezenfekte etmekte kullanılır.

Yapısal Görünüm

Dezenfekte cihazının yapısal görünümü

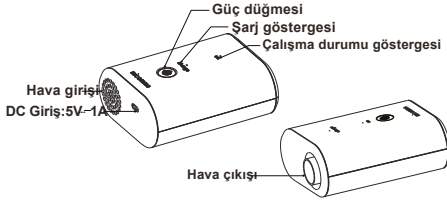

Ürün Hakkında

Bu ürün temel olarak bir ozon jeneratörü (yüksek basınç paketi ve seramik jeneratörü dahil), bir DC fan, bir ana kontrol paneli, anahtarlar, lityum piller, bir mahfaza ve bir güç hattından oluşur. Ana kontrol paneli, ozon üretmek için ozon jeneratörünü kontrol eder. DC fanı, içeriği dezenfekte etmek için ozonu ekipmana üfler.

Ürün Performansı

- Ozon konsantrasyonu: >60mg/m³;
- Dezenfeksiyon süresi: 35 dk;
- Dezenfeksiyon etkisi: Orta - düşük seviye dezenfeksiyon.

Fiziksel ve Elektriksel Parametreler

Tablo 1 Fiziksel ve elektriksel parametreler	
Boyut	Boy x En x Yükseklik 120 mm x 90 mm x 45 mm
Ağırlık	200g
Giriş	5.0 V 1000 mA (maksimum) Güç derecesi: 4 W
Güç kaynağı	Şarj edilebilir Lityum pil, 3.7 V, 2000 mAh
Su geçirmezlik	IPX0

Çevresel Parametreler

Tablo 2 Çevresel parametreler		
	Çalışma koşulları	Saklama koşulları
Sıcaklık	- 5°C ile 45°C	- 20°C ile 55°C
Bağıl nem	%15 ile %85 (yoğuşmasız)	%15 ile %85 (yoğuşmasız)
Atmosferik basınç	83 ile 102kPa (5600 feet deniz seviyesi)	/

Kullanım Talimatı

- Dezenfeksiyon cihazını kullanmadan önce, dezenfekte edilecek makinenin güç hattını fişten çekmeli ve nemlendirici varsa suyu nemlendiriciden boşaltmalısınız.
- Çalıştırma: Güç düğmesine uzun basın; cihaz kısa bir ses çıkarır, çalışma durumu göstergesi "Güç Açık" durumunu gösterir ve rengi dezenfekte etme cihazının çalışmaya başlayacağını belirtmek için yeşile döner.
- Durma: Dezenfeksiyonun tamamlanmasından sonra, cihaz beş kısa ses çıkartacak, dezenfeksiyon cihazı otomatik olarak kapanacak ve çalışma durumu göstergesindeki ışık da sönecektir.
- Çalışan bir dezenfeksiyon cihazını kapatmak istiyorsanız, güç düğmesine uzun basarak elle kapatabilirsiniz. Cihaz kapandığında uzun süreli ses çıkartacak ve çalışma durumu göstergesi kapatılacaktır.
- Önerilen kullanım aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:



Şarj etme Talimatı

- Şarj Etme: Lütfen en iyi şarj etme etkisi için cihazı kapalı durumda şarj edin. Şarj göstergesi (Şarj), şarj işlemi sırasında kırmızı renkte yanar ve cihaz tamamen şarj olduktan sonra yeşile döner. Bu dezenfeksiyon cihazı yaklaşık 2,5 saat sonra tamamen şarj olur.
- Düşük batarya uyarısı: Batarya çalışmayacak kadar düşükse, çalışma durumu göstergesi kırmızı renkte yanıp söner ve cihaz bir uyarı sesi çıkarır. Kullanıcının o anda şarj etmesi önerilir. Dezenfeksiyon cihazı şarj edilmezse, normal şekilde çalışabilir, ancak kalan güç tüm dezenfeksiyon işlemi için yetersiz olabilir.
- Bu ürüne şarj edilebilir bir lityum pil entegre edilmiştir. Şarj bağlantısı için şematik diyagram aşağıda gösterilmiştir:



Uyarılar

- Şarj sırasında cihazı çalıştırmayın.
- Dezenfeksiyon cihazını ve dezenfekte edilecek eşyaları dezenfeksiyon sırasında kapalı bir yere koyun. (ör. PAP cihazınızın çantası) Boş alanın 3 L'ye eşit veya daha az olması en uygundur. 3 L'yi geçen boş alan dezenfeksiyon etkisini azaltabilir.
- Dezenfekte edilen makine, ozonun tamamen dağılmasını sağlamak için dezenfeksiyondan 2 saat sonra kullanılabilir.
- Tam olarak şarj edilmiş durumdayken, dezenfeksiyon cihazı en az üç dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirebilir.
- Dahili lityum pil, bir yolcu uçağının güvenli taşıma gereksinimlerini karşılayacak kapasiteye sahiptir. Valizinizde taşınabilir.
- Makineyi kendi başınıza sökmeyin. Herhangi bir makine arızası durumunda, lütfen satış sonrası servis veya acenteye başvurun. Kendiliğinden yapılan demontajın neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.
- Dahili şarj edilebilir lityum pili daha iyi şarj etmek için, şebeke gücünüzün çıkış gerilimini ve şarj hattı ve şarj cihazı için akım gereksinimlerini öğrenin ve lütfen Kullanım Talimatının Tablo 1'de açıklanan parametreleri izleyin.

- Dezenfeksiyon cihazının çalışma süresi yaklaşık 35 dak. Bu sürede ürün etkili bir dezenfeksiyon yapabilir ve otomatik olarak kapanır. Dezenfeksiyon süresini uzatmaya gerek yoktur.
- Şarj edilebilir bataryanın performansı kullanım sürelerinin artmasıyla azalır. Bu normal bir süreçtir.
- Dezenfekte cihazının dış yüzeyini ılık nemli bir bezle temizleyin. Şarj etmeden önce, dezenfeksiyon cihazının güç bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.
- CPAP, hortum ve maskeyi her hafta sterilize etmeniz önerilir.
- Doğrudan ozonun solunması solunum yollarını kuvvetli bir şekilde uyararak boğazda tahrişe, göğüste sıkışmaya, öksürüğe vs. neden olur.
- OD-100 çalışmasını bitirdiğinde doğrudan kutuyu açarken ya da kutunun üzerine çok yakından ozon kokusunu solumayın. 20-30 dakika bekleyip kutuyu açın, bu ozonun dağılmasına yardımcı olabilir.
- OD-100 dezenfeksiyon işleminin yapıldığı odaların iyi havalandırıldığından emin olun.

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Cihazı şarja takın
Şarj göstergesi çalışmıyor	Adaptör ve güç kablosu arasındaki bağlantıyı kontrol edin
Cihaz şarj sonrası çalışmıyor	Bakım için yetkili firma ile iletişime geçin
Ozon üretilmiyor	Bakım için yetkili firma ile iletişime geçin

Ürün üzerindeki semboller

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Kullanıcı tarafından bakımı yapılmayan parçalar		Bu ürünün geri dönüşümü ve geri kazanımı, WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) ve RoHS'nin (Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlanması) Uygunluk Direktiflerinin ilgili hükümlerine tabidir.
	Dikkat		