

Yoğun Bakımda Non-invaziv Ventilasyona Yeni Alternatif

H-80 Serisi Yüksek Akış Oksijen Tedavisi



H-80 Serisi

BMC yeni H-80 Serisi yüksek akış oksijen tedavisi, klinik tedavinin daha fazla ihtiyacını karşılamak için;


- Özel patentli AutoFlow ve SmartFlow fonksiyonu ile oksijen konsantrasyonu otomatik olarak ayarlanabilir ve maksimum 80L / dak hava-oksijen karışımı sağlar.
- Genel bakımını kolaylaştıran, dezenfeksiyon gerektirmeyen tasarıma ve su haznesinde gaz geri akışını önlemek için bir valfe sahiptir.

Hedef oksijen konsantrasyonu, sıcaklık ve akış ayarlanabilir


- Hedef oksijen konsantrasyonunu otomatik olarak kontrol edin, makinede oksijen dağıtımı, % 21 -% 100, % 1 hassasiyetle;
Duvar oksijen kaynağı, oksijen tüpü, oksijen jeneratörü destekleyebilir;
Dahili ultrasonik oksijen sensörü bakım gerektirmez.
- 9 kademeli nemlendirme sıcaklığı: 29 °C -37 °C, 1 °C hassasiyetle doğru.
- Gelişmiş çift fan tasarımı, iki seviye HFlow ve LFlow, 2 L / dak ~ 80 L / dak, çoğu yaştaki hasta için uygundur.
- Çeşitli sıcaklık ve nem ortamlarıyla kolayca başa çıkabilen ± 3 ayarlanabilir nem telafisi sağlayan yenilikçi 7 seviyeli nem dengeleme fonksiyonu

Yenilikçi Yüksek Akış modeli

- AutoFlow™
Hastanın Tepe Ekspiratuar Akışına (PEF) göre otomatik olarak çıkış akış hızını ayarlayarak tedavi etkinliğini ve hasta konforunu artırmaktadır.

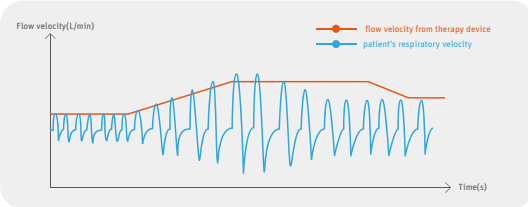

- SmartFlow®
Hastanın her nefesini takip ederek nefesler arasındaki akış inspirasyonda yüksek, ekspirasyonda düşük akım vererek iki seviyeli bir ventilatör cihazı gibi çalışır. Rahat ve Daha ekonomik oksijen kaynağı

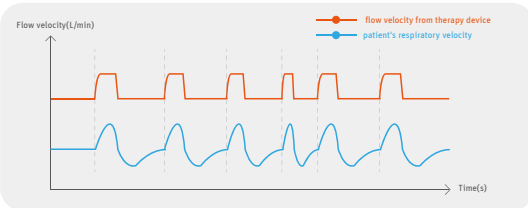


Rahat kullanım ve oksijen tasarrufu için tasarlanmış sıcak bekleme fonksiyonu

- H-80 Serisi, makineyi kısa bir süre için kapatmadan herhangi bir zamanda sıcak oksijen tedavisine devam etmenizi sağlayan, ısınma süresini beklemek zorunda kalmadan oksijen tasarrufu sağlayan sıcak bekleme fonksiyonuna sahiptir.

Daha kapsamlı izleme indeksleri

- Gerçek zamanlı Oksijen Konsantrasyonu, Akış, Sıcaklık, Solunum Hızı, sPEEP izleme.

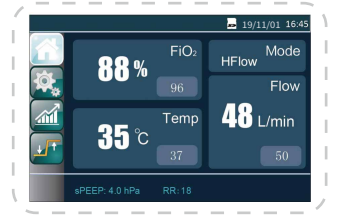

Kolay kurulum

- Entegrasyon ve dezenfeksiyon gerektirmeyen tasarım ile klinik kullanım ve bakım zamanından tasarruf sağlar.

*Trolley opsiyoneldir

H-80 Serisi

	H-80AS	H-80A	H-80M
Oksijen Konsantrasyonunun Ayarlama Yöntemi	Otomatik	Otomatik	Manuel
Akış Takibi	İzlenebilir,Ayarlanabilir	İzlenebilir,Ayarlanabilir	İzlenebilir,Ayarlanabilir
Akış Hızı	2L ~ 80L/dk	2L ~ 80L/dk	2L ~ 80L/dk
Oksijen Konsantrasyonunun Ayarlama Aralığı	21% ~ 100%	21% ~ 100%	21% ~ 100%
★I sıtma Derecesi	29°C ~ 37°C	29°C ~ 37°C	29°C ~ 37°C
★I sıtma Ayarı	9 Kademe	9 Kademe	9 Kademe
Dezenfeksiyon gerektirmeyen sistem	Evet	Evet	Evet
Ekran Boyutu	3.5"	3.5"	3.5"
Geçmişe dönük Grafik Takip	1 gün; 3 gün; 7 gün	1 gün; 3 gün; 7 gün	1 gün; 3 gün; 7 gün
Oksijen Konsantrasyon Takibi	İzlenebilir, Ayarlanabilir	İzlenebilir, Ayarlanabilir	İzlenebilir
Isı Takibi	İzlenebilir, Ayarlanabilir	İzlenebilir, Ayarlanabilir	İzlenebilir, Ayarlanabilir
★sPEEP Takibi	İzlenebilir	İzlenebilir	İzlenebilir
★Solunum Hızı Takibi	İzlenebilir	İzlenebilir	İzlenebilir
Otomatik Filtre değişim özelliği	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
Otomatik Su Doldurma Hatırlatma	Evet	Evet	Evet
★AutoFlow	Evet	/	/
★SmartFlow	Evet	/	/
Nemlendirme Uyumu	-3~+3, 7 Kademe	-3~+3, 7 Kademe	-3~+3, 7 Kademe
★sPEEP	0~4 Kademe	/	/
★Sıcak Bekleme	Evet	Evet	Evet

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü



RESPITEK

www.respitek.com.tr

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/1
1.Kat, 34662 Üsküdar/İstanbul
Tel : +90 216 545 80 80
Fax : +90 216 339 97 07
e-mail : info@respitekvivisol.com

BMC Medical Co., Ltd.

Room 110, Tower A Fengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian,
100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-10-5166 3880 Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810

CE 0123 **NMPA**